

バイオロジカルインジケター

(乾熱滅菌用)

培地付キット

《使用説明書》

菌種

Bacillus atrophaeus NBRC13721 (ATCC 9372)

培地成分

培地:ソイビーン・カゼイン・ダイジェストブロス

指示薬:フェノールレッド

保管上のご注意

- ・ 2~25°Cで遮光保管してください。
(培地は 2~10°Cで保管してください。)
- ・ 滅菌器や殺菌消毒剤から離れた場所に保管してください。

使用前のご注意

- ・ 使用前に有効期限をご確認ください。
- ・ 使用前に本品の完全性をご確認ください。
- ・ 冷蔵保存の場合、室温になってからご使用してください。

廃棄際のご注意

- ・ 滅菌不十分と判定された使用済み及び期限切れの本品は、必ず滅菌処理(121°C、30分)を行った後廃棄してください。

使用方法

- 1 乾熱滅菌をかける容器の中にアンプルを入れ、乾熱滅菌をかけます。
(滅菌温度:160~350°C)
- 2 滅菌終了後、アンプルを取り出し、クリーンベンチに持っていきます。
- 3 十分放熱させたアンプルの青い印を手前にして両端を持ち、くびれの所で山折になるように割ります。



注意: アンプルを割る時や割った後、及びストリップを移り入れる際は、傷つけないように必ず保護メガネ・マスク・手袋を着用してください。

- 4 芽胞ストリップをアンプルから培地に移り入れ、**30~37°C**で二日間または七日間培養します。
- 5 陽性コントロール: 滅菌処理をしていないアンプルからストリップを培地に移り入れ、同様に培養します。陽性コントロールは、使用毎に用いてください。

結果判定

陰性

⇒ 培地の色は赤色から変化なし ⇒ 滅菌完全

陽性⇒ 陽性コントロールのように、培地の色調黄色に変化あり
⇒ 滅菌不完全

製造者

上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

TEL:045-845-2699 FAX:045-845-2889